



**Інструкція з використання  
мікроАЛЬБУМІН Калібратор TURBI.  
Ліофілізована сироватка флакон для 1 мл  
IVD**

Зберігати при температурі 2- 8°C.

**Характеристика**

мікроАЛЬБУМІН Калібратор TURBI - це ліофілізована людська сироватка. Призначена для к для побудови каліброваної кривої при визначенні мікроальбуміну в сечі людини турбідиметричним методом.

**Склад**

Людська сироватка з вмістом альбуміну. Консервована. Концентрація позначена на флаконі.

**Запобіжні заходи**

Компоненти людського походження були перевірені і визнані негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак необхідно дотримуватися обережності, як з потенційно інфекційним матеріалом.

**Підготовка до роботи**

Готовий до використання

Довести до кімнатної температури протягом 30 хв. перед використанням

Неправильне використання та / або зберігання може вплинути на результат.

Неточне відновлення і помилки в техніці аналізу може призвести до помилкових результатів.

**Зберігання і стабільність**

Контрольна сироватка стабільна до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці при температурі 2- 8°C. Треба запобігати забрудненню під час їх використання. Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності або якщо є видимі ознаки мікробних наростів.

Зберігати щільно закритим, коли не використовується.

Фасовка – 1 фл. по 1 мл

Каталожний номер - 49091