

**Паспорт
Суспензія зімозана
для визначення кількості В-лімфоцитів**

Дата виготовлення

Термін придатності 3 міс.

Зберігати при 4-8°C.

Показник	Результати контролю	Відповідність
Об'єм, мл	1	відповідає
Зовнішній вигляд	опалісцируюча рідина	відповідає
Прозорість	слабо каламутна	відповідає
Концентрація зімозана не менш, %	0.05	відповідає

E-mail: granum@granum.com.ua
Безкоштовна гаряча лінія: 0-800-500-561 (для стаціонарних телефонів)

**Інструкція з використання
суспензії зімозана
для визначення кількості В-лімфоцитів**

При постановці реакції змішують рівні об'єми суспензії лімфоцитів і зімозана. За розетку беруть лімфоцит, оточений 3 і більше гранулами зімозана.

У здорових дорослих людей в крові міститься за даними різних авторів 11-20% В-лімфоцитів або $0.27 - 0.31 \times 10^9/\text{л}$.