

**Інструкція
з медичного використання виробу
«АСЛ-О-турбі калібратор»
виробництва SPINREACT, S.A. Іспанія**

Зберігати при 2-8 ° С

Призначення

Кількісне визначення анти-стрептолізину О (АСЛ-О). Калібратор - це ліофілізована сироватка людського походження, що містить концентрацію АСЛ-О, придатну для калібрування АСЛ-О методом турдіметрії.

Реагенти

Калібратор. Людська сироватка.

Концентрація АСЛ-О вказана на етикетці флакону.

Попередження

Компоненти людського походження були перевірені та встановлено негативна реакція на наявність HBsAg, гепатиту С і антитіл до ВІЛ (1/2). Однак, працювати треба обережно, як з потенційною інфекцією.

Калібровка

Значення концентрації калібратора було стандартизовано проти Міжнародного стандарту ASO від NIBSC 97/662.

Підготовка

Розчинити вміст флакона з 1,0 мл дистильованої води. Ретельно змішати, уникаючи формування піни. Перед використанням протягом 10 хв. витримати при кімнатній температурі.

Зберігання і стабільність

Калібратор стабільний до закінчення терміну придатності на етикетці. Зберіганні щільно закритим при температурі 2-8°C, уникати забруднення під час використання. Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності. Після розчинення стабільний протягом 1 місяця при 2-8°C або 3 місяці при -20 °C.