



**Інструкція**  
з медичного використання виробу  
**«Феритин контроль»**  
виробництва SPINREACT, S.A. Іспанія

**IN VITRO**

Зберігати при 2-8 ° C

**Призначення**

Кількісне визначення феритину. Контроль - ліофілізована сироватка людини, яка містить Феритин використовується для оцінки точності та точності визначення феритину в сироватці крові людини за допомогою турбідиметричного методу.

**Реагенти**

Людська сироватка. З низьким рівнем концентрації феритину, який вказаний на етикетці флакона.

**Попередження**

Компоненти людського походження були перевірені та встановлена негативна реакція на наявність HBsAg, гепатиту С і антитіл до ВІЛ (1/2). Однак, працювати треба обережно, як з потенційною інфекцією.

**Калібровка**

Значення концентрації контролю було стандартизовано проти 2-го Міжнародного Стандарт (80/578) від ВООЗ (1992).

**Підготовка**

Розчинити вміст флакону з 2,0 мл дистильованої води. Ретельно змішати, уникаючи формування піни. Перед використанням протягом 10 хв. витримати при кімнатній температурі.

**Зберігання і стабільність**

Калібратор стабільний до закінчення терміну придатності на етикетці. Зберігати щільно закритим при температурі 2-8°C, уникати забруднення під час використання. Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності

Після розчинення стабільний протягом 10 днів при 2-8 ° C або 6 місяців при -20 ° C.