

Інструкція
з медичного використання виробу
«КК та КК-МВ контроль»
виробництва SPINREACT, S.A. Іспанія
IN VITRO

Зберігати при 2-8 °С

Призначення

КК / КК-МВ контроль - ліофілізований людська сироватка. Призначений для контролю точності для використання ручними та автоматичними аналітичними методами.

Реагенти

Людська сироватка. Біологічні добавки. Бактеріостатичні засоби.

Попередження

Компоненти людського походження були перевірені та встановлено негативна реакція на наявність HBsAg, гепатиту С і антитіл до ВІЛ (1/2). Однак, працювати треба обережно, як з потенційною інфекцією.

Підготовка

Розчинити з 2,0 мл дистильованої води. Ретельно перемішати, уникаючи формування піни. Перед використанням залишити на 30 хв. при кімнатній температурі. Неправильне використання або зберігання може вплинути на результат.

Зберігання і стабільність

Контрольна сироватка стабільна до закінчення терміну придатності зазначеного на етикетці. Зберігати щільно закритим при температурі 2-8°C, та запобігати забрудненню під час використання. Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності або якщо є видимі ознаки вирощування мікробів.

Зберігати щільно закритим, коли не використовується.

Стабільність після розчинення:

від 15°C до 25°C - 24 години

від 2°C до 8°C - 3 дні

від -25°C до -15°C - 1 місяць