



Інструкція
з медичного використання виробу
«Мікроальбумін турбі калібратор»
виробництва SPINREACT, S.A. Іспанія

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °С

Призначення

Кількісне визначення мікроальбуміну. Калібратор - розчин людського походження, що містить концентрацію альбуміну, придатну для калібрування, визначення мікроальбуміну методом турбодиметрії.

Реагенти

Калібратор. Розчин людського альбуміну. Консервант. Концентрація альбуміну вказана на етикетці флакону.

Попередження

Компоненти людського походження були перевірені та встановлено негативна реакція на наявність HBsAg, гепатиту С і антитіл до ВІЛ (1/2). Однак, працювати треба обережно, як з потенційною інфекцією.

Калібровка

Значення концентрації калібратора було стандартизовано проти міжнародних довідкових матеріалів CRM 470 / RPPHS.

Підготовка

Готовий до використання.

Зберігання і стабільність

Калібратор стабільний до закінчення терміну придатності на етикетці. Зберігати щільно закритим при температурі 2-8°C, уникати забруднення під час використання. Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності.