

Інструкція
з медичного використання виробу
«Мікроальбумін турбі контроль»
виробництва SPINREACT, S.A. Іспанія

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °С

Призначення

Кількісне визначення мікроальбуміну. Контроль - це розчин, що містить людський альбумін, який використовується для оцінки точності та визначення мікроальбуміну в сечі людини методом турбідиметрії.

Реагенти

Розчин людського альбуміну. З низькою концентрацією альбуміну. Концентрація альбуміну вказана на етикетці флакону.

Попередження

Компоненти людського походження були перевірені та встановлено негативна реакція на наявність HBsAg, гепатиту С і антитіл до ВІЛ (1/2). Однак, працювати обережно, як з потенційною інфекцією.

Калібровка

Значення Контролю було стандартизовано проти міжнародних довідкових матеріалів CRM 470 / RPPHS (BCR).

Підготовка

Готовий до використання

Зберігання і стабільність

Калібратор стабільний до закінчення терміну придатності на етикетці. Зберіганні щільно закритим при температурі 2-8°C, уникати забруднення під час використання. Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності.