

Інструкція
з медичного використання виробу
«Міоглобін калібратор»
виробництва SPINREACT, S.A. Іспанія

IN VITRO

Зберігати при 2-8 ° C

Призначення

Кількісне визначення міоглобіну. Калібратор - рідкий розчин людського походження, що містить концентрацію міоглобіну, придатний для калібрування визначень турбідиметричним методом.

Реагенти

Мб-CAL:

- 1.Калібратор. Людська сироватка.
- 2.Натрій азид 0,95 г / л.

Концентрація міоглобіну вказана на етикетці.

Попередження

Компоненти людського походження, які були протестовані і виявлена наявність HBsAg, HCV і антитіло до ВІЛ (1/2). Характеризуються, як потенційно інфіковані зразки.

Зберігання і стабільність

Калібратор стабільний до закінчення терміну придатності, який зазначений на етикетці при дотриманні температури 2-8°C та відсутності забруднення під час використання. Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності. Для використання в турбідиметричних аналізах.