

**IVD**

SERUM PROTEINS CALIBRATOR. Liquid serum 1 ml

LOT: 26746/20**партія****Термін дії: 2021-12****REF: 99210**

Інструкція з використання Калібратор сироваткових білків. Рідка сироватка 1,0 ml (мл) Імунотурбідиметрія

Тільки для професійного використання!

Характеристика

Калібратор сироваткових білків-рідка сироватка людського походження, що містить концентрації різноманітних білків, необхідних для калібрування визначень складових нижче перерахованих білків імунотурбідиметричним методом.

Склад

Людська сироватка. Консервована. Концентрації складових вказані в списку нижче.

Застереження

Компоненти людського походження були перевірені і визнані негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак необхідно дотримуватися обережності, як з потенційно інфекційним матеріалом.

Калібровка

Значення концентрації калібратора простежуються згідно Стандарту CRM 470/RPPHS (Інститут стандартних зразків і вимірювання, IRMM) (всі складові, крім antithrombin III).

Зберігання та стабільність

Закриті флакони стабільні протягом терміну дії, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці при температурі 2-8°C.

Треба запобігати забрудненню під час їх використання та потрапляння прямих сонячних променів.

Не використовуйте калібратор, якщо пошкоджена упаковка. Не використовуйте після закінчення терміну придатності. Відкриті флакони стабільні протягом 30 d (доб) при температурі 2-8°C.

Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізація реагентів, сироваток, тестових слайдів чи скляних пластин проводити згідно з чинним законодавством.

Транспортування

Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25°C.











Допускається транспортування при середньодобової температурі 37°C не більше 72 h (год).

**IVD**

SERUM PROTEINS CALIBRATOR. Liquid serum 1 ml

LOT: 26746/20**партія****Термін дії: 2021-12****REF: 99210**

Символи на продукції

 Виробник	 : Термін придатності	 : Код партії	 Каталогний номер
 Виріб медичний для діагностики in vitro	 Знак відповідності Технічним регламентам		
 Консультуйтеся з інструкцією із використання	 Температурне обмеження		
 Берегти від сонячного світла	 Засторога. Зверніться до інструкції з використання		

для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Лабораторія Гранум»

Україна. 61001 м. Харків.

вул. Франківська. 14

тел./факс. (057) 752-32- 31

www.granum.ua

Виробник:

СПІНРЕАКТ. С.А.У.

Ктра. Санта Колома. 7

E-17176 Сант Естев де Бас (Жирона) Іспанія

www.spinreact.com



IVD



SERUM PROTEINS CALIBRATOR.
Liquid serum 1 ml

LOT: 26746/20

партія

Термін дії: 2021-12

REF: 99210

granum.ua

**IVD****SERUM PROTEINS CALIBRATOR.
Liquid serum 1 ml****LOT: 26746/20****партія****Термін дії: 2021-12****REF: 99210****АРКУШ КОНТРОЛЬНОГО ЗВІТУ. КЛІНІЧНА ХІМІЯ.**

Білки	Метод	Концентрація mg/dl (мг/дл)
α 1-antitrypsin		349
α 1 -ac. glycoprotein		222
Antithrombin III		103
C3		394
C4		76.0
Haptoglobin		325
IgA		668
IgG		3160
IgM		256
Prealbumin		84.0
Transferrin		806

Цей аркуш контрольного звіту застосован для частини партії. Номер серії в послідовному алфавітному порядку (наприклад А, В, С і тд). Цей продукт вироблен, упакован і протестован згідно системи контролю якості SPINREACT і відповідає всім специфікаціям продукту.

Наша Система якості була затверджена акредитованим реєструючим органом ISO 9001 та ISO 135485