



Probe Cleaner

версія 3, дата останнього перегляду: 10.09.2020 р.

Інструкція з використання Очищувача засобу для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний

Тільки для професійного використання!

Специфікація: нанесена на упаковці чи етикетці

Призначення:

Очищувач є реагентом, який використовується для очищення зонда відбору або трубок приладу. Може використовуватися для щоденного обслуговування.

Обмеження, запобіжні заходи і повідомлення:

1. Використовувати розчинник за рекомендацією сервісного відділу.
2. Уникати контакту зі шкірою та очима. У разі контакту зі шкірою чи очима, негайно промити великою кількістю води або звернутися до лікаря.
3. Уникайте вдихання випаровувань засобу.
4. Щільно закручіть кришку контейнера для запобігання випаровування і забруднення.
5. Утилізуйте залишки після 60 d (доб) використання, після відкриття.

Інгредієнти: гіпохлорит натрію

Мікробіологічний стан: не зазначений

Застосування: Очищувачий засіб призначений для Аналізаторів Автоматичних Гематологічних серії LabAnalyt.

Зразки крові: не використовується.

Зберігання та термін придатності:

1. Зберігати в темному місці, подалі від прямих сонячних променів, температура повинна бути 2-40 °С.
2. Дійсний протягом 12 mth (міс), реагент вважається дійсним після відкупорювання протягом 60 d (доб) .

Вказівки:

Натисніть кнопку Clean в інтерфейсі експлуатації, піднесіть 2 ml (мл) реагенту під зонд забору проб, а потім натисніть кнопку ОК, щоб почати очищення. (див Керівництво по експлуатації.)

Ефективність:

1. Значення рН: 13,00 ±1,00 при 25 ±1 °С.
2. Пусте значення: WBC ≤0.5×10⁹/L (л), RBC ≤0.1×10¹²/L (л), PLT ≤20×10⁹/L (л), HGB ≤5g/L (г/л).
3. Партийні відмінності: значення ΔрН ≤2,0.

Розрахунок і інтерпретація результатів аналізу: не використовується

Зміни по процесам і продуктивності: не використовується

Контроль якості та простежуваності калібраторів: не використовується.

Діапазон вимірювань: не використовується.

Контроль якості:

Тестуються три частини реагентів з кожної партії продукції, дві з них повинні протестуватися з першого пакування, а третя з останнього пакування партії. Уся партія має бути вилучена, якщо навіть одна з трьох частин не пройшла контроль якості.

Символи на упаковці та етикетці

 Медичний виріб для діагностики in vitro	 Обмеження температури	 Ознайомтесь з інструкцією з використання
 Код партії	 Термін придатності	 Виробник
 Берегти від сонячних променів	 Знак відповідності Технічним регламентам	 Дата виробництва
 Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів		



Probe Cleaner

версія 3, дата останнього перегляду: 10.09.2020 р.

ЮРИТ Медікал Електронік Ко., Лтд.,
№ Д-07 Інформейшн Індастрі Дістрікт, Хай-Тех
Зон, Гуйлінь, Гуансі 541004, П.Р.Китай /
URIT Medical Electronic Co., Ltd.,
No.D-07 Information Industry District, High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R.China
Web: www.urit.com

Уповноважений представник:

ТОВ «Лабораторія Гранум»,
вул. Франківська, 14,
м. Харків, Україна, 61001
Тел./факс. (057) 752-32-31
www.granum.ua

granum.ua