



Інструкція з використання Спеціальна контрольна плазма Н

IN VITRO

Зберігати при 2-8°C

Тільки для професійного використання.

Призначення

Спеціальна контрольна плазма Н використовується у факторних аналізах так само, як і свіжа плазма. Цей контроль можна використовувати при виконанні випробувань на будь-якому механічному або фотооптичному приладі для коагуляції разом з усіма відповідними комерційними реагентами.

Склад набору

1. Спеціальна контрольна плазма Н.
2. Інструкція з використання.
3. Сертифікат якості.

Перелік необхідного устаткування

- піпетки місткістю 1.0 ml (мл).

Підготовка реагентів

У флакон внести 1.0 ml (мл) дистильованої води і розчинити вміст при кімнатній температурі 18-25°C і легкому погойдуванні. Розведену плазму перед дослідженням витримати 20 min (хв) при кімнатній температурі.

Зберігання та стабільність

Зберігання повинно проводитися при температурі 2-8°C протягом усього терміну придатності. Під час використання реагентів запобігати забруднення та потрапляння прямих сонячних променів.

Значення фактора VIII стабільні протягом 2 h (год) при 2-8°C. Усі інші параметри стабільні протягом 4 h (год) при температурі 2-8°C або 4 wk (тижд) при -20 °C при миттєвому заморожуванні.

Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізація реагентів, сироваток, тестових слайдів чи скляних пластин проводити згідно з чинним законодавством.

Транспортування

Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25°C.

Допускається транспортування при середньодобової температурі 37°C не більше 72 h (год).

Гарантії виробника

1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013 р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 18 mth (міс) з дня виготовлення набору.

Комплектація

	REF 9.005
Вміст	1 ml (мл)
Спеціальна контрольна плазма Н	1 фл. x 1 ml (мл)

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.
Тел./факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua

Символи на продукції

Виробник	Виготовлено: Дата виробництва	Придатно до: Термін придатності	Серія: Номер серії
IVD Виріб медичний для діагностики in vitro	Консультуйтеся з інструкцією із використання	Берегти від сонячного світла	Знак відповідності Технічним регламентам
Обмеження	Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів	Температурне	Каталогний номер