



## Інструкція з використання СпЛ Трансферин Турбі Контроль

IN VITRO

Зберігати при 2-8°C

Тільки для професійного використання.

### Характеристика

СпЛ Трансферин Турбі Контроль - рідка сироватка людського походження, що містить трансферин. Призначена для контролю точності визначення трансферину імунотурбідиметричним методом.

### Склад

Людська сироватка. Консервована.

### Застереження

Компоненти людського походження були перевірені і визнані негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак необхідно дотримуватися обережності, як з потенційно інфекційним матеріалом.

### Калібрування

Значення концентрації складових контролю простежуються згідно Стандарту ERM-DA470k/IFCC (всі складові, окрім antitrythombin III).

### Зберігання та стабільність

Закриті флакони стабільні протягом терміну дії, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці при температурі 2-8°C. Треба запобігати забрудненню під час їх використання та потрапляння прямих сонячних променів. Не використовуйте контроль, якщо пошкоджена упаковка. Не використовуйте після закінчення терміну придатності. Відкриті флакони стабільні протягом 30 d (доб) при температурі 2-8°C.

### Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізацію реагентів, сироваток проводити згідно чинного законодавства.

### Транспортування


Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25°C. Допускається транспортування за середньодобової температури 37°C не більше 72 h (год)

### Гарантії виробника






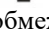



1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013 р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) з дня виготовлення набору.

### Комплектація

	Кат. № 7.097
Вміст	
СпЛ Трансферин Турбі Контроль	1 фл. x 1 ml (мл)

 ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.  
Тел./факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua

### Символи на продукції

 Виробник	<b>Виготовлено:</b> Дата виробництва	<b>Придатно до:</b> Термін придатності	<b>Серія:</b> Номер серії
 <b>IVD</b> Виріб медичний для діагностики in vitro	 Консультуйтеся з інструкцією із використання	 Берегти від сонячного світла	 Знак відповідності Технічним регламентам
 Обмеження	 Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів	 Температурне	 Каталожний номер



## Аналітичний паспорт

IN VITRO

Назва виробу	<b>СпЛ Трансферин Турбі Контроль</b>		
Призначення	Для контролю точності визначення трансферину імунотурбідиметричним методом		
<b>REF 7.097</b>			
Зберігати при	2-8°C		
Серія		Виготовлено	Придатно до
<b>№/п</b>	<b>Показник</b>	<b>Технічні вимоги</b>	<b>Результати контролю</b>
<b>1. Фізико-хімічні показники</b>			
1.1	СпЛ Трансферин Турбі Контроль	безбарвний або жовтуватий розчин	відповідає
<b>2. Аналітичні характеристики</b>			
2.1	Трансферин, mg/dl (мг/дл)	97.6-146	122
<b>3. Комплектація</b>			
3.1	Вміст		
3.2	СпЛ Трансферин Турбі Контроль	1 фл. x 1 ml (мл)	відповідає
Контроль якості	Контроль якості проведено згідно системи якості ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ»		
Висновок ВКЯ	Контроль пройдено. Відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 р № 754		
	ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14, тел/факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua		