



Інструкція з використання Імерсійної рідини для мікроскопії

IN VITRO

Зберігати при 15-25°C

Тільки для професійного використання.

Призначення

Імерсійна рідина для мікроскопії призначена для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів дослідження в клініко-діагностичних лабораторіях.

Склад

- Імерсійна рідина для мікроскопії.
- Інструкція з використання.
- Сертифікат якості.

Підготовка реагентів

Реагент готовий до використання

Проведення досліджень

- Слід дочекатися повного висихання мазка за для уникнення утворення міцел, які не дозволять провести повноцінне дослідження.
- Додайте 1-2 краплі рідини на препарат.
- Проведіть дослідження відповідно до інструкції з експлуатації мікроскопа.
- Імерсійну рідину для мікроскопії рекомендовано видаляти з поверхні препарату за допомогою серветки змоченої о-ксилолом, етиловим або ізопропіловим спиртом. Очищення об'єктивів після використання здійснювати відповідно до інструкції з експлуатації мікроскопа.

Зберігання та стабільність

Стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні щільно закритим в оригінальній упаковці при 15-25°C. Зберігати та використовувати подалі від джерел тепла, оскільки виріб має горючі властивості. Запобігати потраплянню прямих сонячних променів.

Вимоги безпеки та утилізації

- Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
- Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з виробом.
- Знезараження та утилізацію реагентів згідно з чинним законодавством.

Транспортування

Транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25°C.

Допускається транспортування при середньодобовій температурі 37°C не більше 72 h (год).

Гарантія виробника

- Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013 р. при додержанні споживачем умов зберігання.
- Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) з дня виготовлення набору.

Комплектація

	REF 14.015
Вміст	100 ml (мл)
Імерсійна рідина для мікроскопії	1 фл. x 100 ml (мл)

 ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.

 Тел./факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua

Символи на продукції

 Виробник	Виготовлено: Дата виробництва	Придатно до: Термін придатності	Серія: Номер серії
 IVD	Виріб медичний для діагностики in vitro		Консультуйтеся з інструкцією із використання
	Берегти від сонячного світла		Знак відповідності Технічним регламентам
	Температурне обмеження		Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів
	REF	Каталожний номер	