



## Інструкція з використання СпЛ ЛВЩ/ЛНЩ Калібратор

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °С

Тільки для професійного використання.

### Характеристика

СпЛ ЛВЩ/ЛНЩ Калібратор - ліофілізована людська сироватка. Призначений для побудови калібрувального графіка при визначенні концентрації ХС ЛПВЩ та/або ЛПНЩ ручними методами або на автоматичних аналізаторах.

### Склад

Людська сироватка. Консервована. Ліофілізована.

### Запобіжні заходи

Компоненти людського походження були перевірені і визнані негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак необхідно дотримуватися обережності, як з потенційно інфекційним матеріалом.

### Підготовка до роботи

1. Розвести в 1.0 ml (мл) дистильованої води.
2. Ретельно перемішати, не допускаючи утворення піни.
3. Довести до кімнатної температури протягом 30 min (хв) перед використанням.

### Зберігання і стабільність

Калібрувальна сироватка стабільна до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці при температурі 2-8 градусів за Цельсієм. Треба запобігати забрудненню та потраплянню прямих сонячних променів під час використання реагента. Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності або якщо є видимі ознаки бактеріального забруднення. Зберігати щільно закритим. Після розведення стабільний при 15-25 °С протягом 30 h (год), 2-8 °С протягом 2 wk (тижд), -25...-15 °С протягом 3 mth (міс).

### Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізацію реагентів, сироваток проводити згідно чинного законодавства.

### Транспортування

Транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25 °С. Допускається транспортування за середньодобовою температури 37 °С не більше 72 h (год).

### Гарантії виробника

1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) з дня виготовлення набору.

### Комплектація

	<b>REF</b> 7.007
СпЛ ЛВЩ/ЛНЩ Калібратор	1 фл. x 1 ml (мл)

 ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.  
Тел./факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua

### Символи на продукції

 Виробник	<b>Виготовлено:</b> Дата виробництва	<b>Придатно до:</b> Термін придатності	<b>Серія:</b> Номер серії		
 <b>IVD</b>	Виріб медичний для діагностики in vitro		Консультуйтеся з інструкцією із використання		
	Берегти від сонячного світла		Знак відповідності Технічним регламентам		Температурне обмеження
	Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів		Каталожний номер		