



## Інструкція з використання СпЛ АСО/СРБ/РФ Контроль. Високий рівень

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °С

Тільки для професійного використання.

### Характеристика

СпЛ АСО/СРБ/РФ Контроль. Високий рівень - це ліофілізована людська сироватка. Призначена для контролю точності визначення АСО, СРБ, РФ в сироватці людини турбідиметричним методом.

### Склад

Людська сироватка з високим вмістом АСО, СРБ, РФ. Консервована. Ліофілізована.

### Запобіжні заходи

Компоненти людського походження були перевірені і визнані негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак необхідно дотримуватися обережності, як з потенційно інфекційним матеріалом.

### Підготовка до роботи

1. Розвести в 1.0 ml (мл) дистильованої води.
2. Ретельно перемішати, не допускаючи утворення піни. Залишити на 10 min (хв) при кімнатній температурі.

### Зберігання і стабільність

Контрольна сироватка стабільна до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці при температурі 2-8 °С. Треба запобігати забрудненню та потраплянню прямих сонячних променів під час використання реагента.

Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності або якщо є видимі ознаки бактеріального забруднення. Зберігати щільно закритим. Після розведення стабільний при 2-8 °С протягом 10 d (доб), -20 °С протягом 6 mth (міс)

### Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізацію реагентів, сироваток проводити згідно чинного законодавства.

### Транспортування

Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25 °С. Допускається транспортування за середньодобовою температури 37 °С не більше 72 h (год).

### Гарантії виробника

1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) з дня виготовлення набору.

### Комплектація

|   |                   |
|---|-------------------|
|   | REF 7.040         |
| СпЛ АСО/СРБ/РФ Контроль. Високий рівень | 1 фл. x 1 ml (мл) |

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.  
Тел./факс: (057) 752-32-31, [www.granum.ua](http://www.granum.ua)

### Символи на продукції

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  Виробник |  Виготовлено: Дата виробництва |  Придатно до: Термін придатності |  Серія: Номер серії                      |
|  IVD      | Виріб медичний для діагностики in vitro   |                                  | Консультуйтеся з інструкцією із використання  |
|           | Берегти від сонячного світла  |                                  | Знак відповідності Технічним регламентам  |
|         | Температурне обмеження  |                                  | Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів |
|  |   |                                  | Каталожний номер  |