



Інструкція з використання СпЛ Калібратор HbA1c. Рівень 1

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °С

Тільки для професійного використання.

Характеристика

СпЛ Калібратор HbA1c. Рівень 1 - це ліофілізований гемолізат із еритроцитів людини. Призначений для калібрування при визначенні гемоглобіну A1c.

Склад

Людська кров. Консервована. Ліофілізована.

Запобіжні заходи

Компоненти людського походження були перевірені і визнані негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак необхідно дотримуватися обережності, як з потенційно інфекційним матеріалом.

Підготовка до роботи

1. Розвести в 0.5 ml (мл) дистильованої води.
2. Ретельно перемішати 10 min (хв), не допускаючи утворення піни або до повного розчинення.
3. Залишити на 10 min (хв) при кімнатній температурі.

Калібратор повинен бути проаналізований таким же чином, як зразки крові, включаючи приготування гемолізату.

Зберігання і стабільність

Калібрувальна сироватка стабільна до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці при температурі 2-8 °С. Треба запобігати забрудненню під час їх використання та потрапляння прямих сонячних променів. Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності або якщо є видимі ознаки бактеріального забруднення. Зберігати щільно закритим, коли не використовується. Після розведення стабільний при 2-8 °С протягом 30 d (доб).

Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізацію реагентів, сироваток проводити згідно чинного законодавства.

Транспортування

Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25 °С. Допускається транспортування за середньодобовою температури 37 °С не більше 72 h (год).

Гарантії виробника


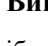










1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) з дня виготовлення набору.

Комплектація

	REF 7.042
СпЛ Калібратор HbA1c. Рівень 1	1 фл. x 0.5 ml

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.
Тел./факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua

Символи на продукції

 Виробник	 Виготовлено: Дата виробництва	 Придатно до: Термін придатності	 Серія: Номер серії
 IVD	Виріб медичний для діагностики in vitro	 i	Консультуйтеся з інструкцією із використання
 	Берегти від сонячного світла		Знак відповідності Технічним регламентам
	Температурне обмеження		Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів
	Каталожний номер		