



Інструкція з використання СпЛ Мікроальбумін Турбі Калібратор

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °С

Тільки для професійного використання.

Характеристика

СпЛ Мікроальбумін Турбі Калібратор - це рідка людська сироватка. Призначений для побудови каліброваної кривої при визначенні мікроальбуміну в сечі людини турбідиметричним методом.

Склад

Людська сироватка з вмістом альбуміну. Консервована.

Запобіжні заходи

Компоненти людського походження були перевірені і визнані негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак необхідно дотримуватися обережності, як з потенційно інфекційним матеріалом.

Підготовка до роботи

Готовий до використання.

Довести до кімнатної температури протягом 30 min (хв) перед використанням.

Зберігання і стабільність

Калібрувальна сироватка стабільна до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці при температурі 2-8 °С. Треба запобігати забрудненню під час їх використання та потрапляння прямих сонячних променів.

Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності або якщо є видимі ознаки бактеріального забруднення.

Зберігати щільно закритим, коли не використовується.

Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізацію реагентів, сироваток проводити згідно чинного законодавства.

Транспортування

Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25 °С.

Допускається транспортування за середньодобової температури 37 °С не більше 72 h (год).

Гарантії виробника

1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) з дня виготовлення набору.

Комплектація

	REF 7.044
СпЛ Мікроальбумін Турбі Калібратор	1 фл. x 1 ml (мл)

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.

Тел./факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua

Символи на продукції

 Виробник	 Виготовлено: Дата виробництва	 Придатно до: Термін придатності	 Серія: Номер серії						
 IVD	Виріб медичний для діагностики in vitro		Консультуйтеся з інструкцією із використання						
	Берегти від сонячного світла		Знак відповідності Технічним регламентам		Температурне обмеження		Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів		Каталожний номер