



Інструкція з використання СпЛ Калібратор сироваткових білків

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °С

Тільки для професійного використання.

Характеристика

СпЛ Калібратор сироваткових білків - рідка сироватка людського походження, що містить концентрації різноманітних білків, необхідних для побудови калібрувальних кривих при визначенні нижче перерахованих білків імунотурбідиметричним методом.

Склад

Людська сироватка. Консервована.

Застереження

Компоненти людського походження були перевірені і визнані негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак необхідно дотримуватися обережності, як з потенційно інфекційним матеріалом.

Калібровка

Значення концентрації калібратора простежуються згідно Стандарту CRM 470/RPPHS (Інститут стандартних зразків і вимірювання, IRMM) (всі складові, крім antithrombin III).

Зберігання та стабільність

Закриті флакони стабільні протягом терміну дії, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці при температурі 2-8 °С. Треба запобігати забрудненню під час їх використання та потрапляння прямих сонячних променів. Не використовуйте калібратор, якщо пошкоджена упаковка. Не використовуйте після закінчення терміну придатності. Відкриті флакони стабільні протягом 30 d (доб) при температурі 2-8 °С.

Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізацію реагентів, сироваток проводити згідно чинного законодавства.

Транспортування

Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25 °С. Допускається транспортування за середньодобової температури 37 °С не більше 72 h (год).

Гарантії виробника

1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) з дня виготовлення набору.

Комплектація

	REF 7.050
СпЛ Калібратор сироваткових білків	1 фл. x 1 ml (мл)

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.
Тел./факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua

Символи на продукції

 Виробник	Виготовлено: Дата виробництва	Придатно до: Термін придатності	Серія: Номер серії
 IVD	Виріб медичний для діагностики in vitro	 i	Консультуйтеся з інструкцією із використання
 ☀	Берегти від сонячного світла	 ↓	Знак відповідності Технічним регламентам
 🌡	Температурне обмеження	 ⚠	Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів
		 REF	Каталожний номер