



Інструкція з використання реагентів для побудови калібрувального графіка Калібратори білка СпЛ 20 - 100 g/L

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °C

Тільки для професійного використання.

Призначення

Реагенти застосовують для побудови калібрувального графіка при кількісному визначенні загального білку в біологічних рідинах в межах від 20 g/l (г/л) до 100 g/l (г/л) клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях, науково-дослідницькій практиці.

Склад набору

1. Калібратори: розчини білку. Точне значення концентрації вказано на флаконах та сертифікаті якості.
2. Інструкція з використання.
3. Сертифікат якості.

Аналітичні характеристики

Коефіцієнт варіації 3%.

Підготовка реагентів

Готові до використання. Після розкриття флакону стійкі протягом терміну придатності при 2-8 °C.

Зберігання та стабільність

Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим при 2-8 °C. Під час використання реагентів запобігати забруднення та потрапляння прямих сонячних променів.

Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізацію реагентів, сироваток, тестових слайдів чи скляних пластин проводити згідно з чинним законодавством.

Транспортування

Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25 °C. Допускається транспортування при середньодобовій температурі 37 °C не більше 72 h (год).

Ознаки погіршення реагенту

- Присутність часток і помутніння.

Гарантії виробника

1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 12 mth (міс) з дня виготовлення набору.

Комплектація

Вміст	REF 7.067	REF 7.068
Калібратори	5 x 2 ml (мл)	5 x 5 ml (мл)

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.

Тел./факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua

Символи на продукції

 Виробник	 Виготовлено: Дата виробництва	 Придатно до: Термін придатності	 Серія: Номер серії			
 Виріб медичний для діагностики in vitro	 Консультуйтеся з інструкцією із використання	 Берегти від сонячного світла	 Знак відповідності Технічним регламентам	 Температурне обмеження	 Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів	 Каталожний номер