



## Інструкція з використання реagenta для побудови калібрувального графіка Калібратор білка 100 g/L СпЛ

IN VITRO

Зберігати при 2-8 °C

Тільки для професійного використання.

### Призначення

Реагент застосовують для побудови калібрувального графіка при кількісному визначенні загального білка в біологічних рідинах в клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях, науково-дослідницькій практиці.

### Склад набору

1. Калібратор. Розчин білку. Точне значення концентрації вказано на флаконі та сертифікаті якості
2. Інструкція з використання.
3. Сертифікат якості.

### Аналітичні характеристики

Коефіцієнт варіації 3%.

### Підготовка реagenta

Готовий до використання. Після розкриття флакону стійкий протягом терміну придатності при 2-8 °C.

### Зберігання та стабільність

Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим при 2-8 °C. Під час використання реagentів запобігати забруднення та потрапляння прямих сонячних променів.

### Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізація реagentів, сироваток, тестових слайдів чи скляних пластин проводити згідно з чинним законодавством.

### Транспортування

Набори транспортують всіма видами закритого транспорту при температурі до 25 °C.  
Допускається транспортування при середньодобовій температурі 37 °C не більше 72 h (год.)

### Ознаки погіршення реagenta

Присутність часток і помутніння.

### Гарантії виробника

1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 12 mth (міс) з дня виготовлення набору.

### Комплектація

Вміст	REF 7.071	REF 7.072
Калібратор	1 x 5 ml (мл)	1 x 10 ml (мл)

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.  
Тел./факс: (057) 752-32-31, [www.granum.ua](http://www.granum.ua)

### Символи на продукції

 Виробник	 Виготовлено: Дата виробництва	 Придатно до: Термін придатності	 Серія: Номер серії
 Виріб медичний для діагностики in vitro	 Консультуйтеся з інструкцією із використання	 Берегти від сонячного світла	 Знак відповідності Технічним регламентам
 Обмеження	 Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів	 Температурне	 Каталожний номер