



# DETERGENT

версія 4, дата останнього перегляду: грудень 2024р.

## Інструкція з використання Детергенту для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний

Тільки для діагностики in vitro

Тільки для професійного використання

**Специфікація:** 5 L (л), 10 L (л), 20 L (л),

**Призначення:** детергент використовується з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними 5-Part-Diff серії для ефективного видалення білкових відкладень та очищення приладу від забруднень, які впливають на результати аналізу в клінічній діагностиці у клініко-діагностичних лабораторіях при дослідженнях in vitro.

**Склад:** хлорид натрію 0,5%, безводний сульфат натрію 1,0%, соляна кислота 0,05%, сурфактант (ПАР) 0,2%.

### Експлуатаційні характеристики:

1. Значення рН:  $9,50 \pm 0,30$  при  $25 \pm 1$  °C.
2. Відмінності в партії:  $\Delta$ рН значення  $\leq 0,60$ .

### Використання:

1. Введіть впускний патрубок детергенту в контейнер з детергентом, випустіть повітря з контейнера і закрутіть кришку. Натисніть: «Змінити» в інтерфейсі обслуговування. Зробіть холостий підрахунок в інтерфейсі аналізатору. Зверніть увагу на значення холостого зразку, який запрограмований в приборі. (див. інструкцію до Аналізатору).
2. Встановіть детергент під аналізатор.

**Примітка:** Уникайте прямих сонячних променів, тримайте подалі від холодного або гарячого повітря, використовуйте при 15-30 °C.

### Зберігання та стабільність:

1. Зберігати при температурі 2 - 40 °C.
2. Під час використання реагенту уникайте забруднення та потрапляння прямих сонячних променів.
3. Реагент стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим протягом 24 (mth) місяців. Після відкриття стабільність становить 60 (d) днів при зберіганні 15 - 30 °C.

### Примітки та застереження:

1. Використовуйте реагент згідно інструкції.
2. Переконайтеся, що реагенти відповідають моделі аналізатора. Не використовуйте реагент, отриманий від іншої компанії, в іншому випадку це може привести до помилок вимірювання та хибних результатів.
3. Якщо продукт заморожувався, дайте нагрітися до кімнатної температури, а потім обережно переверніть продукт, щоб ретельно його перемішати.

### Вимоги безпеки та утилізації:

1. Щільно закривайте кришку контейнера, щоб запобігти випаровуванню та забрудненню. Утилізуйте залишки після 60 (d) днів використання з моменту відкриття контейнера.
2. Уникайте вдихання випаровувань реагенту, його потрапляння в очі, на шкіру. У разі потрапляння негайно промийте великою кількістю води та зверніться по лікарську допомогу.
3. Утилізацію необхідно проводити згідно чинного законодавства

### Гарантія виробника:

1. Виробник гарантує відповідність якості продукції при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 24 (mth) місяці дня виготовлення.

### Символи на упаковці та етикетці

Медичний виріб для діагностики in vitro	Обмеження температури	Ознайомтесь з інструкцією з використання
Код партії	Термін придатності	Виробник
Сонячних променів	Знак відповідності Технічним регламентам	Дата виробництва
Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів		Берегти від сонячних променів

**ЮРІТ Медікал Електронік Ко., Лтд.,**  
№ Д-07 Інформейшн Індастрі Дістрікт,  
Хай-Тех Зон, Гуйлін, Гуансі 541004, П.Р.Китай /  
**URIT Medical Electronic Co., Ltd.,**  
No.D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R.China  
Тел: +86(773)2288586  
Факс: +86(773)2288560  
Web: www.urit.com

**Уповноважений представник:**  
ТОВ «Лабораторія Гранум»,  
вул. Франківська, 14,  
м. Харків, Україна, 61001  
Тел./факс. (057) 752-32-31  
[www.granum.ua](http://www.granum.ua)