



# Probe Cleaner

версія 4, дата останнього перегляду: грудень 2024р.

## Інструкція з використання Очищуючого засобу для LabAnalyt 3-Part Аналізатор Гематологічний

Тільки для діагностики in vitro

**Специфікація:** 100 ml (мл), 500 ml (мл)

**Призначення:** реагент використовується з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt для очищення зонда або трубки приладу у клініко-діагностичних лабораторіях при дослідженнях in vitro.

**Склад:** гіпохлорид натрію 2%

**Експлуатаційні характеристики:**

1. Значення рН:  $\geq 13,00$  при  $25 \pm 1$  °С.
2. Відмінності в партії:  $\Delta$ рН значення  $\leq 2,0$ .

**Використання:** Натисніть кнопку «Clean» в інтерфейсі прибору при експлуатації, піднесіть 2 ml (мл) реагенту під зонд забору проб, а потім натисніть кнопку ОК, щоб почати очищення. (див Керівництво по експлуатації).

**Примітка:** Уникайте прямих сонячних променів, тримайте подалі від холодного або гарячого повітря, використовуйте при 15 - 30 °С.

**Зберігання та стабільність:**

1. Зберігати при температурі 2 - 40 °С.
2. Під час використання реагенту уникайте забруднення та потрапляння прямих сонячних променів.
3. Реагент стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим протягом 12 (mth) місяців. Після відкриття стабільність становить 60 (d) днів при зберіганні 15 - 30 °С.

**Примітки та застереження:**

1. Використовуйте реагент згідно інструкції.
2. Переконайтеся, що реагенти відповідають моделі аналізатора. Не використовуйте реагент, отриманий від іншої компанії, в іншому випадку це може привести до помилок вимірювання та хибних результатів.
3. Якщо продукт заморожувався, дайте нагрітися до кімнатної температури, а потім обережно переверніть продукт, щоб ретельно його перемішати.
4. Може використовуватися для щоденного обслуговування.

**Вимоги безпеки та утилізації:**

1. Щільно закривайте кришку контейнера, щоб запобігти випаровуванню та забрудненню. Утилізуйте залишки після 60 (d) днів використання з моменту відкриття контейнера.
2. Уникайте вдихання випаровувань реагенту, його потрапляння в очі, на шкіру. У разі потрапляння негайно промийте великою кількістю води та зверніться по лікарську допомогу.
3. Утилізацію необхідно проводити згідно чинного законодавства

**Гарантія виробника:**

1. Виробник гарантує відповідність якості продукції при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 12 (mth) місяці дня виготовлення.

### Символи на упаковці та етикетці

Медичний виріб для діагностики in vitro	Обмеження температури	Ознайомтеся з інструкцією з використання
Код партії	Термін придатності	Виробник
Сонячних променів	Знак відповідності Технічним регламентам	Дата виробництва
Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів		

**ЮРИТ Медікал Електронік Ко., Лтд.,**  
№ Д-07 Інформейшн Індастрі Дістрікт,  
Хай-Тех Зон, Гуйлін, Гуансі 541004, П.Р.Китай /  
**URIT Medical Electronic Co., Ltd.,**  
No.D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R.China  
Тел: +86(773)2288586  
Факс: +86(773)2288560  
[www.urit.com](http://www.urit.com)

**Уповноважений представник:**  
ТОВ «Лабораторія Гранум»,  
вул. Франківська, 14,  
м. Харків, Україна, 61001  
Тел./факс. (057) 752-32-31  
[www.granum.ua](http://www.granum.ua)