



# Probe Cleaner

версія 4, дата останнього перегляду: грудень 2024р.

## Інструкція з використання Очищуючого засобу для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний

Тільки для діагностики in vitro

Тільки для професійного використання

**Специфікація:** 100 ml (мл)

**Призначення:** реагент використовується з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt для очищення зонда або трубки приладу у клініко-діагностичних лабораторіях при дослідженнях in vitro.

**Склад:** гіпохлорид натрію 2%

**Аналітичні характеристики:**

- Значення рН:  $\text{pH} \geq 13,00 (25 \pm 1) ^\circ\text{C}$ .
- Відмінності в партії:  $\Delta\text{pH}$  значення  $\leq 2,0$ .

**Використання:** Натисніть кнопку «Clean» в інтерфейсі приладу при експлуатації, піднесіть 2 ml (мл) реагенту під зонд забору проб, а потім натисніть кнопку ОК, щоб почати очищення. (див Керівництво по експлуатації).

**Примітка:** Уникайте прямих сонячних променів, тримайте подалі від холодного або гарячого повітря, використовуйте при 15-30 °C.

**Зберігання та стабільність:**

- Зберігання: при температурі від 2 °C до 40 °C.
- Під час використання реагенту уникайте забруднення та потрапляння прямих сонячних променів.
- Стабільність: реагент стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим протягом 12 (mth) місяців. Після відкриття стабільність становить 60 (d) днів при зберіганні від 15 °C до 30 °C.

**Примітки та застереження:**

- Використовуйте реагент згідно інструкції.
- Переконайтеся, що реагенти відповідають моделі аналізатора. Не використовуйте реагент, отриманий від іншої компанії, в іншому випадку це може привести до помилок вимірювання та хибних результатів.
- Якщо продукт заморожувався, дайте нагрітися до кімнатної температури, а потім обережно переверніть продукт, щоб ретельно його перемішати.
- Може використовуватися для щоденного обслуговування.

**Вимоги безпеки та утилізації:**


- Щільно закривайте кришку контейнера, щоб запобігти випаровуванню та забрудненню. Утилізуйте залишки після 60 (d) днів використання з моменту відкриття контейнера.
- Уникайте вдихання випаровувань реагенту, його потрапляння в очі, на шкіру. У разі потрапляння негайно промийте великою кількістю води та зверніться по лікарську допомогу.
- Утилізацію необхідно проводити згідно чинного законодавства

**Гарантія виробника:**

- Виробник гарантує відповідність якості продукції при додержанні споживачем умов зберігання.
- Гарантійний термін зберігання становить 12 (mth) місяці дня виготовлення.

**Символи на упаковці та етикетці**

 Медичний виріб для діагностики in vitro	 Обмеження температури	 Ознайомтесь з інструкцією з використання
 Код партії	 Термін придатності	 Виробник
 Березти від сонячних променів	 Знак відповідності Технічним регламентам	 Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів

 **ЮРИТ Медікал Електронік Ко., Лтд.,**  
№ Д-07 Інформейшн Індастрі Дістрікт,  
Хай-Тех Зон, Гуїлін, Гуансі 541004, П.Р.Китай /  
**URIT Medical Electronic Co., Ltd.,**  
No.D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R.China  
Тел: +86(773)2288586  
Факс: +86(773)2288560  
Web: www.urit.com

**Уповноважений представник:**  
ТОВ «Лабораторія Гранум»,  
вул. Франківська, 14,  
м. Харків, Україна, 61001  
Тел./факс. (057) 752-32-31  
[www.granum.ua](http://www.granum.ua)