



Інструкція з використання СпЛ Ультра СРБ Контроль. Рідкий

IN VITRO

Зберігати при 2-8°C

Тільки для професійного використання.

Призначення

СпЛ Ультра СРБ Контроль. Рідкий призначений для контролю точності визначення низьких концентрацій СРБ в сироватці турбідиметричним методом.

Характеристики

Людська сироватка з низькою концентрацією СРБ.

Значення концентрації

Точне значення вказано в аналітичному паспорті.

Стабільність та зберігання

Зберігати при 2-8°C.

Підготовка до роботи

Готовий до використання.

Примітки

1. Продукт тільки для діагностики in vitro.
2. Калібратор може бути використаний лише за призначенням, кваліфікованим персоналом, при відповідних лабораторних умовах.
3. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Запобіжні заходи

1. Продукт містить азид натрію (в концентрації 0,005% в розчиненому калібраторі) як консервант. Уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

Вимоги безпеки та утилізації

1. Уникати потрапляння в рот, очі та на шкіру. В разі потрапляння, промити великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря.
2. Використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з набором.
3. Знезараження та утилізація реагентів, сироваток, тестових слайдів чи скляних пластин проводити згідно з чинним законодавством.

Транспортування

Набори транспортують всіма видами критого транспорту за середньодобової температури до 25°C. Допускається транспортування за середньодобової температури до 37°C не більше 72 h (год).

Гарантії виробника

1. Виробник гарантує відповідність якості наборів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro № 754 від 02.10.2013 р. при додержанні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) з дня виготовлення набору.

Комплектація

	REF 0.000
СпЛ Ультра СРБ Контроль. Рідкий	1 фл. x 2 ml (мл)

ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14.

Тел./факс: (057) 752-32-31, www.granum.ua

Символи на продукції

 Виробник	Виготовлено: Дата виробництва	Придатно до: Термін придатності	Серія: Номер серії
 IVD	Виріб медичний для діагностики in vitro	 Консультуйтеся з інструкцією із використання	
 Берегти від сонячного світла	 Знак відповідності Технічним регламентам	 Температурне обмеження	
 Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів	REF Каталогний номер		