



Інструкція з використання Мікрокапіляра скляного для відбору зразків для гематологічних аналізаторів

Тільки для діагностики in vitro

Тільки для професійного використання

Об'єм: 20 μ L (мкл)

Призначення: для забору зразка крові та його подальшого розведення з ділюентом в потрібній концентрації. Груша призначена для багаторазового використання. Мікрокапіляр призначений для одноразового використання.

Принцип: при стисненні гумової груші відбувається всмоктування рідини, при відпусканні груші відбувається крапельне дозування.

Вміст: скляний мікрокапіляр – 500 шт/уп, гумова груша – 1 шт

Застосовуваність: цей виріб підходить для роботи з Автоматичними Гематологічними Аналізаторами серії LabAnalyst: 2900Plus, 3000Plus, BH-40P, BH-70P, 5160, 5250, 5380, Smart V5.

Примітки та застереження:

1. Не використовуйте мікрокапіляр повторно.
2. У разі потрапляння зразка у грушу, її знезараження та дезінфекцію слід проводити згідно чинного законодавства.
3. Не кидайте, не тисніть на мікрокапіляр, використовуйте з обережністю.
4. При роботі з мікрокапілярами використовуйте засоби індивідуального захисту.
5. Утилізуйте згідно чинного законодавства

Зберігання та термін придатності:

Зберігайте мікрокапіляри у сухому добре вентильованому приміщенні в оригінальній упаковці до 30°C.

Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на грушу та тримайте подалі від джерел тепла.

При зберіганні уникайте складування іншого вантажу поверх виробу.

Порядок використання:

1. Обережно дістаньте з упаковки один мікрокапіляр, уважно ознайомтесь із позначками на ньому - капіляр йде з трьома позначками (маркерами).
2. Одягніть грушу, що йде в комплекті, на мікрокапіляр з тієї сторони, де товща позначка (маркер) ближче до краю.
3. Стисніть грушу пальцями та занурьте у зразок, послабте зтискання та зробіть забір крові чітко по другу поділку (не допускаючи недобору або перебору).
4. Перенесіть зразок у ділюент, знову стискаючи грушу, таким чином здійснюючи випуск рідини з мікрокапіляру.
5. Після забору зразку крові обережно від'єднайте грушу від мікрокапіляра.

Дата виробництва: див. на упаковці або етикетці.

Термін придатності: див. на упаковці або етикетці.

Версія 1.0

Дата випуску: грудень 2022 року

Дата останнього перегляду: грудень 2022 року

Символи на упаковці та етикетці

	Медичний виріб для діагностики		Обмеження температури		Ознайомтесь з інструкцією з використання
	Код партії		Термін придатності		Виробник
			Дата виробництва		Крихке. Обережно
			Для одноразового використання		Знак відповідності Технічним регламентам

 **ЮРИТ Медікал Електронік Ко., Лтд.,**
№ Д-07 Інформейшн Індастрі Дістрікт,
Хай-Тех Зон, Гуїлін, Гуансі 541004, П.Р.Китай /
URIT Medical Electronic Co., Ltd.,
No.D-07 Information Industry District,
High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R.China
Тел: +86(773)2288586
Факс: +86(773)2288560
Web: www.urit.com

Уповноважений представник:
ТОВ «Лабораторія Гранум»,
вул. Франківська, 14,
м. Харків, Україна, 61001
Тел./факс. (057) 752-32-31
www.granum.ua