



Detergent for LabAnalyt 5-Part

Hematology Analyzer

версія 1.5, дата останнього перегляду: листопад 2025р.

Інструкція з використання медичного виробу

«Детергент для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний»

Тільки для діагностики in vitro

Тільки для професійного використання

Специфікація: 5 L (л), 10 L (л)

Призначення: детергент призначений для ефективного видалення білкових відкладень та очищення Аналізаторів Автоматичних Гематологічних від забруднень, які впливають на результати аналізу в клінічній діагностиці у клініко-діагностичних лабораторіях при дослідженнях in vitro.

Склад: хлорид натрію 0,5%, безводний сульфат натрію 1,0%, соляна кислота 0,05%, сурфактант (ПАВ) 0,2%.

Застосовуваність: використовується з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff: LabAnalyt-5160, LabAnalyt-BH-5160 СРБ, LabAnalyt-5380, LabAnalyt-BH-5380 СРБ, LabAnalyt-BH-5390, LabAnalyt-5250

Вміст упаковки: канистра з детергентом, інструкція з використання

Експлуатаційні характеристики:

1. Значення pH: $9,50 \pm 0,30$ при 25 ± 1 °C.
2. Відмінності в партії: ΔpH значення $\leq 0,60$.

Підготовка реагенту: виріб готовий до використання.

Процедура використання: 1. Введіть впускний патрубок детергенту в контейнер з детергентом, випустіть повітря з контейнера і закрутіть кришку. Натисніть: «Змінити» в інтерфейсі обслуговування. Зробіть холостий підрахунок в інтерфейсі аналізатору. Зверніть увагу на значення холостого зразку, який запрограмований в приладі.

2. Встановіть детергент під аналізатор.

Примітка: Уникайте прямих сонячних променів, тримайте подалі від холодного або гарячого повітря, використовуйте при 15 - 30 °C.

Увага! Для отримання більш детальної інформації зверніться до інструкції з використання відповідного гематологічного аналізатора.

Зберігання та стабільність:

1. Зберігати при температурі 2 - 40 °C.
2. Під час використання реагенту уникайте забруднення та потрапляння прямих сонячних променів.
3. Реагент стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим протягом 24 mth (міс). Після відкриття стабільність становить 60 d (доб) при зберіганні 15 - 30 °C.

Примітки та застереження:

1. Використовуйте реагент згідно даної інструкції та інструкції з використання відповідного гематологічного аналізатора.
2. Переконайтеся, що реагенти відповідають моделі аналізатора. Не використовуйте реагент, отриманий від іншої компанії, в іншому випадку це може привести до помилок вимірювання та хибних результатів.
3. Якщо продукт заморожувався, дайте нагрітися до кімнатної температури, а потім обережно переверніть продукт, щоб ретельно його перемішати.

Вимоги безпеки та утилізації:

1. Щільно закривайте кришку контейнера, щоб запобігти випаровуванню та забрудненню. Утилізуйте залишки після 60 d (доб) використання з моменту відкриття контейнера.
2. Уникайте вдихання випаровувань реагенту, його потрапляння в очі, на шкіру. У разі потрапляння негайно промийте великою кількістю води та зверніться по лікарську допомогу.
3. Використовуйте засоби індивідуального захисту при роботі з детергентом.
4. Дезінфекцію, утилізацію проводьте згідно чинного законодавства та/або встановлених у вашій установі/організації затверджених процедур та методик.

Гарантії виробника:

1. Виробник гарантує відповідність якості продукції при дотриманні споживачем умов зберігання.
2. Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) дня виготовлення.

Символи на упаковці та етикетці

 Медичний виріб для діагностики in vitro	 Обмеження температури	 Ознайомтесь з інструкцією з
 Код партії	 Термін придатності	 Виробник
 Берегти від сонячних променів	 Знак відповідності Технічним регламентам	 Засторога. Зверніться до інструкції з використання для отримання інформації щодо застережень, попереджень, запобіжних заходів

 ЮРІТ Медікал Електронік Ко., Лтд., № Д-07 Інформейшн Індастрі
Дістрікт, Хай-Тех Зон, Гуйлін, Гуансі 541004, П.Р.Китай /
URIT Medical Electronic Co., Ltd., No.D-07 Information Industry District,
High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R.China
Тел: +86(773)2288586, Факс: +86(773)2288560
Web: www.urit.com

Уповноважений представник:
ТОВ «Лабораторія Гранум»,
вул. Франківська, 14,
м. Харків, Україна, 61001
Тел./факс. (057) 752-32-31
www.granum.ua